

はじめに

このガイドでできること

YY文字起こしアプリとAiLENSをつなぐと、話した内容をAiLENSの画面に文字として表示できます。



話したことが
文字で見える！

今日は
いい天気ですね

初回
だけ！

初回だけやること

AiLENSをYY文字起こし用にするための準備と、YY文字起こしアプリとAiLENSをはじめてつなぎます。



①AiLENS を
YY 文字起こし用にする

②YY文字起こしアプリと
AiLENSをはじめてつなぐ

毎回
使う！

2回目からやること

AiLENSを先に起動してから、YY文字起こしアプリを開きます。自動でつながるまで、少し待ちます。
※この順番がおすすめです。



①AiLENS の
電源を入れる

②YY 文字起こしを
開く

③自動でつながる
のを待つ

④文字がAiLENSに
表示されたらOK



一度つながれば、次からはとてもかんたん！
くわしい手順は、次のページから説明します。

ご利用ガイド版数：第 1 版

YY 文字起こしアプリバージョン：Ver2.6.0-31 以上

YY 文字起こしアプリと AiLENS の使い方

まず、ガイドの流れと用意するもの

青は初回だけの設定、緑は 2 回目以降の使い方です。



このガイドの流れ

まず
確認

はじめに確認すること

- P.3 AiLENS本体のボタンを知る
- P.4 AiLENSの電源操作と画面表示
- P.5 Android端末のBluetoothをオンにする

初回
だけ!

初回だけの設定

はじめて使うときに行う設定です。

- P.6-7 AiLENSをYY文字起こし用にアップデートする
- P.8 YY文字起こしアプリでAiLENS接続をオンにする
- P.9 AiLENSをスキャンして接続する

毎回
使う!

2回目以降の使い方

一度つながれば、毎回はこちらです。

- P.10 2 回目以降の使い方 (自動再接続)
- P.11 AiLENSとAndroid端末のマイクの切り替え
- P.12 AiLENSの設定画面

困った
とき

困ったとき

- P.13 困ったとき (AiLENSが検出されない)
- P.14 困ったとき (AiLENSと接続できない)

用意するもの

①
Android端末②
YY文字起こし
アプリ③
AiLENS④
AiLENS
UPGRADEアプリ⑤
インターネット
接続⑥
Bluetoothが
使える状態

AiLENSは充電しておくともスムーズに使えます。
充電ケーブル (USB Type-C) も用意しておきましょう!



ご利用には市販の AR グラス AiLENS (販売先: SB C&S) を各ユーザー様にてご購入ください。本体の保証・修理・サポートは、デバイスの販売元が定める範囲での対応となります。

🕒 AiLENS 本体のボタンを知る

AiLENS には、主に使う場所が3つあります。

どこをさわるか
先に確認
しましょう！



(右側フレームの横にあります)

① タッチバー

長押ししたり、
スライドしたりして使います



(右側フレームの下にあります)

② 充電ポート

付属の充電コネクタを接続し、
USB Type-C で充電します

③ 電源ボタン

電源のオン / オフや表示の
消去 / 再表示に使用します



覚えて

おくと安心！

- ① **タッチバー** : 長押しやスライドで、確認や操作をします
- ② **充電ポート** : 充電がないときは、USB Type-C ケーブルで充電しましょう
- ③ **電源ボタン** : 5秒長押しで電源のオン/オフができます

充電のポイント

- ・充電をすると、自動で電源入ります
- ・充電が完了すると、ライトが緑色に変わります
- ・充電後は、必ず電源をオフにしましょう
- ・オフにしないと、電池が減ってしまいます



はじめて使うときは、まず充電をしておきましょう。バッテリー残量が少ないと、うまく動かないことがあります。

電源を入れる

- ① AiLENS 右側の電源ボタンを確認する



右側フレームの下にあります

- ② 電源ボタンを5秒間長押しする

5秒間長押し



- ③ AiLENS の画面に文字が出たら OK です



文字が出たら
起動して
います！



Bluetooth 接続が
解除されました。
デバイスとアプリを
再接続してください

まずは電源を入れて、画面に文字が出ることを確認しましょう！




電源を切る

- ① 電源ボタンを5秒間長押しする

5秒間長押し



- ② AiLENS の画面に以下のメッセージが表示される

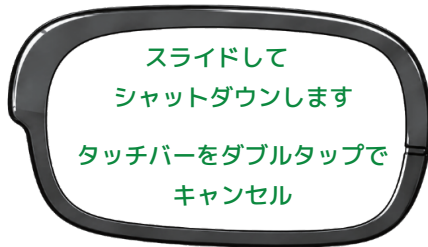

- ③ タッチバーを指で前方向へスライドする



AiLENS の画面表示を消す / 再表示

画面表示を消す

→電源ボタンを 2 回タップ

再表示する

→電源ボタンを 1 回タップ

うまく起動しないときは…

- ・バッテリーが少ない可能性があります。充電してからもう一度お試しください。
- ・電源ボタンをしっかりと5秒間長押ししてください。







Android 端末の Bluetooth をオンにする

Android 端末と AiLENS をつなぐために、Bluetooth をオンにします。

① 設定アプリを開く

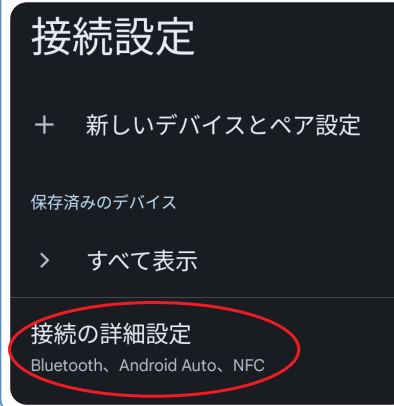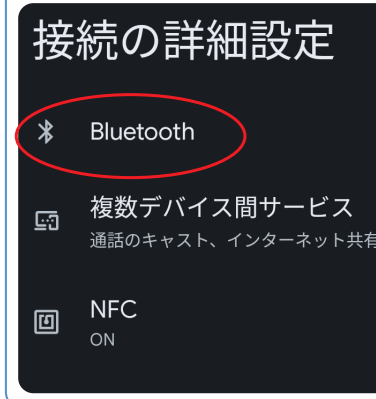② 「接続設定」を
タップする③ 「接続の詳細設定」
をタップする④ 「Bluetooth」を
タップする⑤ Bluetooth が
オンか確認する

※機種によって、画面表示や操作方法が少し異なる場合があります。

クイック設定からもオンにできます

画面の上から下にスワイプし、クイック設定を表示する
Bluetooth のマークをタップしてオンにするBluetooth は
Android 端末と AiLENS を
つなぐために必要です！Bluetooth が
オフのままだと、
AiLENS が見つからず、
つながりません。

必ずオンにしておきましょう。



Bluetooth をオンにしたら、次のページで AiLENS を YY 文字起こし用にアップデートしましょう！



初回
だけ!

🕒 AiLENS を YY 文字起こし用にする

買ったばかりの AiLENS は、そのままでは YY 文字起こしと接続出来ません。

AiLENS UPGRADE アプリで YY 文字起こし用にアップデートします。

この設定は
はじめて使うときに
1 回だけ行います。




設定手順 1/2 (アップデートの準備)


- ① Play ストアを開く




- ② 「AiLENS Update」を検索する

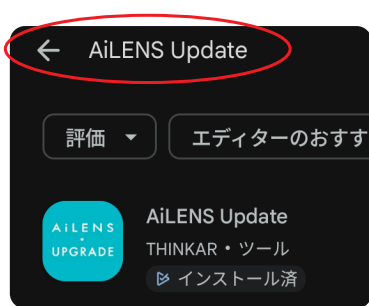

- ③ 「AiLENS Update」をインストールする

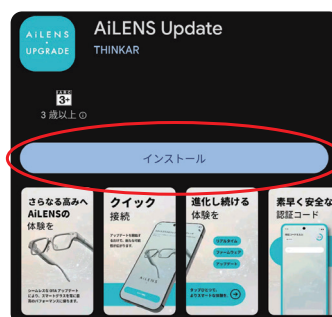

- ④ 近くの AiLENS を探すため「許可」をタップする

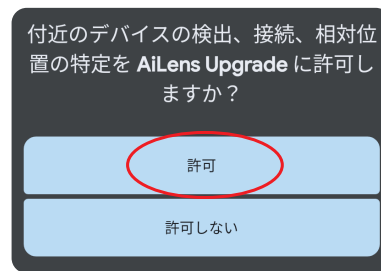

- ⑤ 通知を受け取る場合は「許可」をタップする



- ⑥ 「AiLENS」の電源を入れる



- ⑦ 「今すぐ開始」をタップする



- ⑧ 「デバイスを追加」をタップする



電源が入っている周囲の AiLENS をスキャンします

- ⑨ デバイスを検索中



- ⑩ 「接続」をタップする



アップデートする前に
確認しましょう



電池残量が**50%以上**あることを確認してください。足りない場合は、先に充電してから行いましょう。アップデートには**10~20分**ほどかかります。完了するまで、端末とAiLENSは近くに置いてください。アップデート中は、端末の操作は控えてください。別のアプリを開くと上手く進まない場合があります。

初回
だけ!

🕒 AiLENS を YY 文字起こし用に使う

この設定は
はじめて使うときに
1回だけ行います。



買ったばかりの AiLENS は、そのままでは YY 文字起こしと接続できません。
AiLENS UPGRADE アプリで YY 文字起こし用にアップデートします。

設定手順 2/2 (アップデートを完了する)

⑪ AiLENS の画面に「タッチバーを長押しして確認」と表示される

⑫ フレーム右側の側面にある「タッチバー」を長押しする

⑬ Android の端末にペアリング画面が表示されたら「ペアリング」をタップする

⑭ 確認画面でもう一度「ペアリング」をタップする

⑮ 確認コードに「AISIN」と入力し「次へ」をタップする

※確認コードは半角英字の大文字で入力

⑯ 「アップデート」をタップする

⑰ 表示が 100% になったら完了です

→
アップデート
完了後

⑱ AiLENS UPGRADE アプリを終了する
※開いているアプリ一覧を表示しアプリを上からスワイプします

端末により、操作が異なる場合があります

⑲ AiLENS の [Bluetooth ペアリング] を解除する

YY 文字起こしアプリで接続するため一度 Bluetooth の登録を解除します

解除方法は P13 参照

💡 この作業は、AiLENS を YY 文字起こし用にするための初回準備です。一度できれば、毎回行う必要はありません。

YY 文字起こしアプリで AiLENS 接続をオンにする

YY 文字起こしアプリの設定で、AiLENS を使えるようにします。


この設定は
はじめて使うときに
1 回だけ行います。

■ YY 文字起こしアプリの接続機能を有効にする

- ① YY 文字起こし
-
- アプリを開く



- ② 左下の「設定」を
-
- タップする

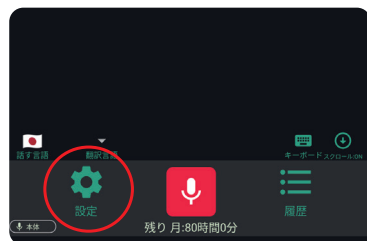

- ③ 「詳細設定」
-
- をタップする



- ④ 「AiLENS を有効にする」
-
- をオンにする




- ⑤ 下にスワイプして
-
- 詳細設定を「閉じる」




■ AiLENS 接続の設定を開く

- ⑥
-
- 画面上のメニュー
-
- 「AiLENS」をタップする

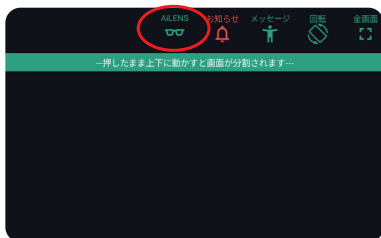


■ AiLENS のスキャンを行う

- ⑦ 「スキャン」をタップする
-
- ※ 電源が入っている
-
- 近くの AiLENS を検出します

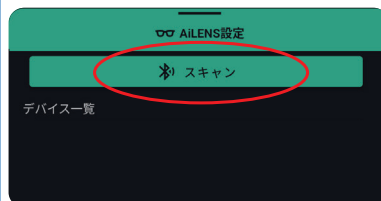

- ⑧
-
- スキャン中と表示される

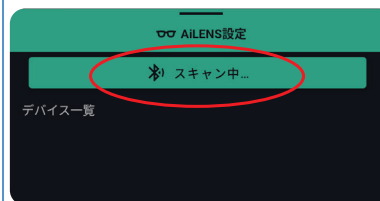

うまくできないときは…

- AiLENS を再起動してください。
- YY 文字起こしアプリの「付近のデバイス」が許可されているか確認してください。
 1. 「設定」アプリを開く
 2. 「アプリ」をタップ
 3. 「YY 文字起こし」をタップ
 4. 「権限」をタップ
 5. 「付近のデバイス」が許可されているか確認する

※ 端末によって表示名が異なる場合があります。



ここまできたら、次は「AiLENS をスキャンして接続する」に進みましょう!




AiLENS をスキャンして接続する

YY 文字起こしアプリで、AiLENS のスキャンをして接続しましょう

■ AiLENS のペアリングを行う

①

スキャンして検出された AiLENS が表示されるのでタップする

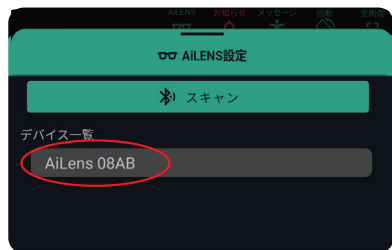

②


「AiLENS の指示に従って、ペアリングを完了してください」と表示される



■ AiLENS 側の操作

③

AiLENS の画面に「タッチバーを長押しして確認」と表示される

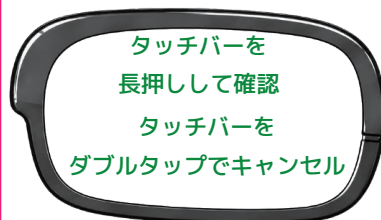

④

フレーム右側の側面にある「タッチバー」を長押しする




見つかるまで少し時間がかかることもあります。あせらずに待ってみてくださいね。




■ YY 文字起こしアプリのペアリングを有効にする

⑤

YY 文字起こしアプリの端末にペアリングの確認画面が表示されたら「ペアリング」または「ペア設定する」をタップする

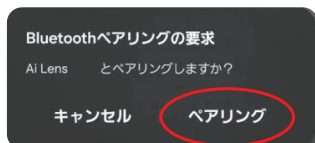

または

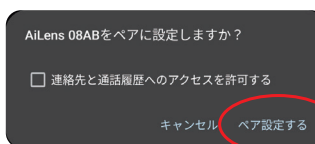


⑥

もう一度確認画面が表示される「ペアリング」または「ペア設定する」をタップする




または

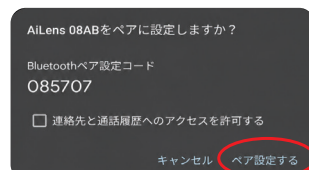

⑦

「接続済み」になれば OK です

※音声認識を行うと、文字が AiLENS 側に表示されます。

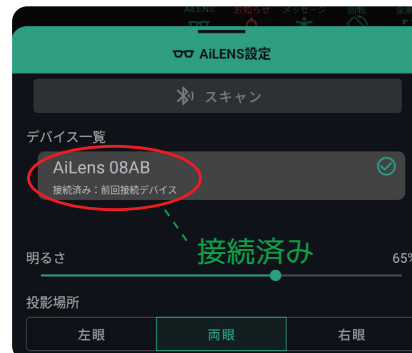

接続できないときは…

- AiLENS を再起動してください。
- Bluetooth がオンか確認してください。
- YY 文字起こしアプリの「付近のデバイス」が許可されているか確認してください。
 1. 「設定」アプリを開く
 2. 「アプリ」をタップ
 3. 「YY 文字起こし」をタップ
 4. 「権限」をタップ
 5. 「付近のデバイス」が許可されているか確認する



※端末によって表示内容が異なる場合があります

毎回
使う！

2回目以降の使い方（自動再接続）

AiLENS を先に起動してから、YY 文字起こしアプリを開きます。
自動でつながるまで、少し待ちます。※この順番がおすすめです。

おすすめの使い方

- ① AiLENS を先に起動する
AiLENS の電源を入れます。



電源ボタン
5 秒間長押し

- ② YY 文字起こしアプリを開く



- ③ 自動でつながるまで待つ
接続されるまで、少し待ちます。



- ④ AiLENS が接続されると
「自動接続しました」の画面が表示されます



- ⑤ 音声認識開始
→AiLENS に文字が表示されたら OK

こんにちは
よろしくお願いします



YY 文字起こしアプリを先に起動した場合

自動接続は 3 分間有効です。
3 分を過ぎた場合は、下記の手順で再接続してください。




スムーズに接続するため、
AiLENS の電源を先にオンにすることを
おすすめします。




再接続手順

- ① 画面上のメニュー
「 AiLENS」をタップする

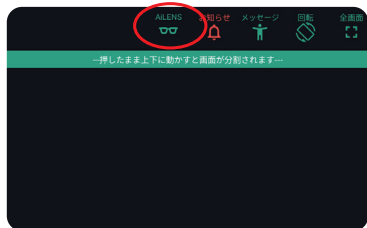

- ② 「前回接続デバイス」
をタップする

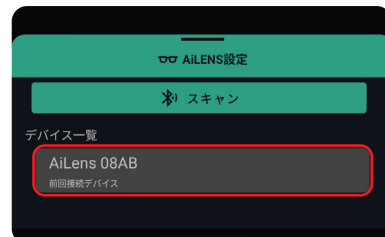

- ③ 「前回デバイスを再接続します」
と表示される



接続できないときは…

- AiLENS を先に起動してから 30 秒ほど待っても自動でつながらない場合は再接続の手順をお試しください。
- Android 端末の Bluetooth がオンになっているか確認してください。
- Bluetooth のペアリングを解除して再度接続してください。
(P.13 参照)






音声認識に使うマイクを選びます




マイクの切り替え手順

- ① 画面左下のマイク名をタップする

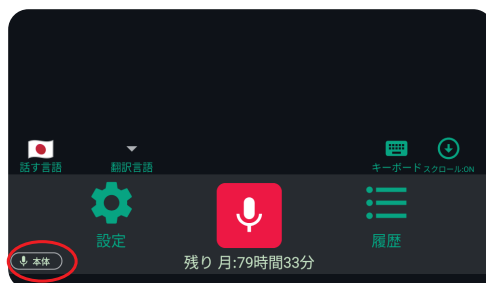

- ② 使いたいマイクを選択する

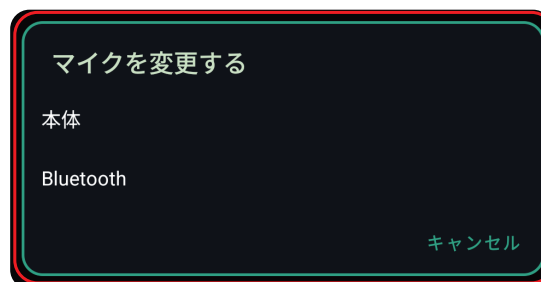

- ・ 本体 → Android 端末 マイクを使います
- ・ Bluetooth → AiLENS マイクを使います


- ③ 画面左下のマイク名が変わっていれば OK です




- ・ 本体
- ・ AiLENS ○○○○(端末番号 下 4 桁)

AiLENS の設定を確認しましょう

① 設定画面を開く

AiLENS 接続後に
画面上のメニュー
「 AiLENS」をタップする

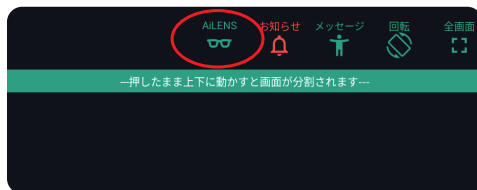

② 設定画面でできること



- ・明るさ
→ AiLENS に表示される文字の明るさを調整できます
※暗い場所では、明るさを下げると周りから見えにくくなります
- ・投影場所（レンズの表示方法）
→ 両目 / 左目 / 右目に切り替えられます
- ・テキストサイズ（文字のサイズ）
→ 小さい / 普通 に切り替えられます
- ・表示行数
→ AiLENS に表示される行数を調整できます
- ・翻訳表示
→ 通常表示 / 翻訳結果のみ表示 に切り替えられます
- ・自動消灯
→ 音声認識結果がない場合の消灯時間を設定できます
(なし / 15 秒 / 30 秒)

ポイント

使いやすい設定に
合わせて
調整しましょう!





困ったとき

(AiLENS が検出されない)


あわてず、
順番に確認しましょう。



まず確認すること

- ① AiLENS の電源が入っていること 
- ② 「付近のデバイス」が許可されていること 
 1. 「設定」アプリを開く
 2. 「アプリ」をタップ
 3. 「YY 文字起こし」をタップ
 4. 「権限」をタップ
 5. 「付近のデバイス」が許可されているか確認する

※Bluetooth がオンでも「付近のデバイス」が許可されていないと、AiLENS を検出できない場合があります。

- ③ AiLENS がほかの端末に接続されていないこと 

ほかの端末につながっている場合は、先につながっている端末で、AiLENS のペアリングを解除してください。解除方法は、右側の手順をご確認ください。

解除後、接続したい端末で
もう一度スキャンしてください。

【解除後に行うこと】


- 1) P.8「AiLENS接続をオンにする」の⑥～⑧に沿って接続画面を開きます。
- 2) P.9「AiLENSをスキャンして接続する」の①～⑧に沿って再度接続してください。

ペア設定の解除方法 (Bluetooth のペアリング解除)


- ① 「設定」アプリを開く



- ② 「接続設定」をタップする

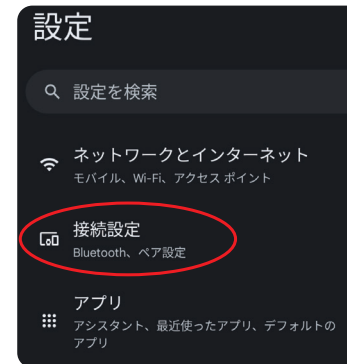


- ③ 保存済みのデバイスから「AiLENS」を探す

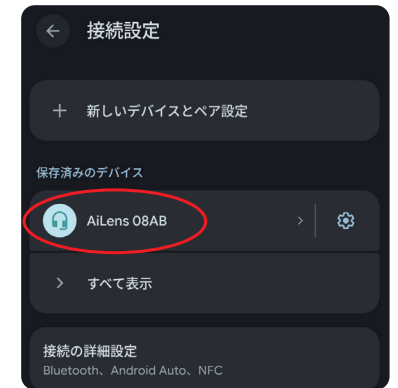


- ④ AiLENS 名の右側にある「歯車」をタップする



- ⑤ 「削除」をタップする

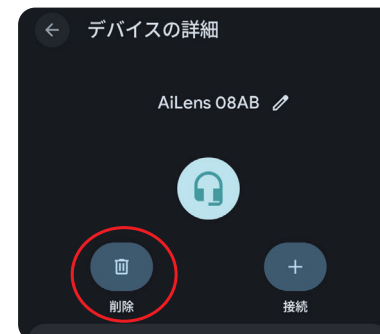

- ⑥ 確認画面で「このデバイスとのペア設定を解除」をタップする

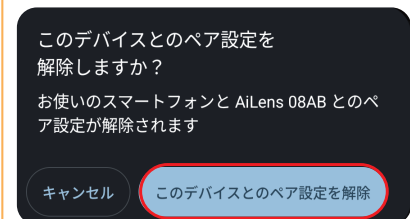


※機種によって、画面表示や操作方法が異なる場合があります。

困ったとき (AiLENS と接続できない)


AiLENS と接続ができない場合


〇〇 AiLENS に下記の表示が出た場合は
右の手順で再接続してください。

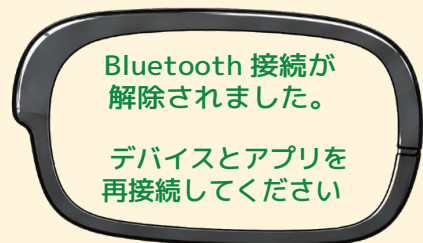

- ① YY 文字起こし
アプリを開く



- ② 画面上的メニュー
「 AiLENS」をタップする

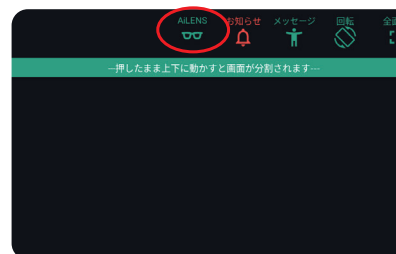

- ③ 「スキャン」をタップする




- ④ AiLens の画面に
メッセージが表示される



- ⑤ 一覧から
AiLens をタップする



- ⑥ もう一度「スキャン」を
タップする

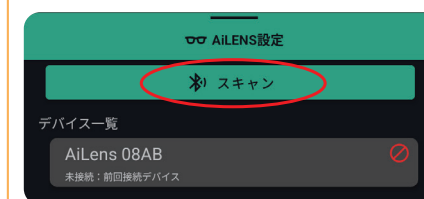

この場合は

- ⑦ もう一度 ペアリングをやり直してください。

→ P.9「AiLENS をスキャンして接続する」の③～⑦に沿って、再接続してください。

